

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Lorgen proporcionará las tarjetas de papel para la toma de muestras, etiquetadas con códigos internos.

1. Toma de muestras de sangre periférica

Sacar **3ml de sangre** periférica en un **tubo con anticoagulante (EDTA)** e invertir varias veces para asegurar la homogenización con el anticoagulante.

2. Muestras de sangre seca en papel

Para facilitar el transporte, conservación y el análisis de aquellas pruebas que se realizan a partir de sangre total hemos optimizado nuestros análisis para que puedan ser realizados a partir de sangre depositada en papel.

Los pasos a seguir para depositar la sangre en este soporte son los siguientes:

- Coger una alícuota de **125µl** de sangre. Asegurarse que el tubo EDTA está homogeneizado.
- **Depositar los 125µl en el centro** del círculo y dejar que se expanda. Repetir el proceso para cada uno de los círculos.
- **Dejar secar por completo** las manchas y conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio. Una vez seca la muestra, puede conservarse de manera indefinida a temperatura ambiente.
- **Indicar en la tarjeta el nombre y apellidos del paciente.**
- **Cumplimentar el consentimiento informado con los datos del paciente y etiquetarlo con el código Lorgen proporcionado.**

