

## Artículos incluidos en su kit de colección

COLECCIÓN DE TABURETES

- 1 – Caja del kit
- 1 – Formulario de solicitud de prueba (TRF)
- 1 – Bandeja recolectora
- 1 – Vial de muestra\*
- 2 – Guantes
- 1 – Bolsa para muestras con cierre de cremallera
- 1 – Almohadilla absorbente
- 1 – Envío por correo del paquete clínico de FedEx

Si le falta alguno de los componentes necesarios o tiene preguntas sobre la colección, llame al Departamento de Atención al Cliente de Diagnostic Solutions Laboratory al 877-485-5336.

\* Evite el contacto de la piel y los ojos con el líquido del vial de muestra. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si su piel entra en contacto con el líquido del vial, lávela con agua y jabón. Si se ingiere, comuníquese con un médico.

Los ensayos en GI-MAP fueron desarrollados y/o las características de rendimiento determinadas por Diagnostic Solutions Laboratory.



## GI Microbial Assay Plus

**IMPORTANTE:** La muestra de heces debe recibirse dentro de los 6 días posteriores a su recolección.

Si no puede enviar la muestra el día de la recolección, refrigérela y envíela lo antes posible, preferiblemente dentro de los 3 días.

## RESULTADOS EN LOS QUE PUEDES CONFIAR

ANÁLISIS DE HECES DE ADN mediante qPCR

## INSTRUCCIONES DE ENVÍO

Llame a FedEx al 1-800-463-3339 para programar su recogida gratuita

1. Cuando comience el saludo automático, diga: "Programar una recogida".
2. Cuando se le pregunte si su etiqueta tiene la palabra "sello", diga "Sí".
3. Su número de seguimiento se puede encontrar en la etiqueta de devolución.

[www.DiagnosticSolutionsLab.com](http://www.DiagnosticSolutionsLab.com) | INVESTIGACIÓN. TECNOLOGÍA. RESULTADOS.



## INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE TABURETES

– SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE –  
LA RECOPIACIÓN INADECUADA PUEDE INVALIDAR LOS RESULTADOS

NOTA: Revise todas las instrucciones y los componentes del kit de recolección antes de comenzar la recolección de muestras. NO deje de tomar medicamentos recetados a menos que se lo indique su médico.



Puede encontrar instrucciones adicionales para completar el formulario de solicitud de prueba en:  
[www.diagnosticsolutionslab.com/patients/test-request-form-overview](http://www.diagnosticsolutionslab.com/patients/test-request-form-overview)

1



Escriba el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y la fecha de recolección en la etiqueta del vial de muestra.\*

\*La etiqueta real puede variar de la imagen.



Si es posible, borre la orina antes de recolectar las heces para evitar mezclarla con la muestra de heces.


2



IMPORTANTE: Póngase guantes\* y pase las heces a la bandeja recolectora.

\* Use guantes mientras recolecta la muestra.


3

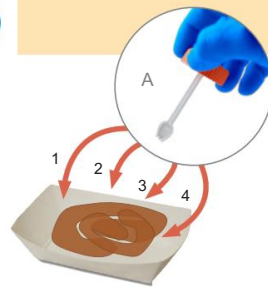

NO DESECHE EL LÍQUIDO ROSADO DEL VIAL DE MUESTRA.

A) Usando la cuchara adherida a la tapa del vial de muestra, introduzca las heces de múltiples áreas de la muestra en el vial.\*

\* Recoger de al menos 4 áreas de muestra.

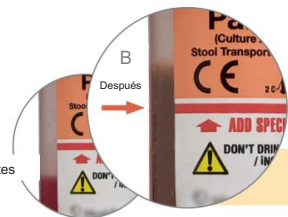

B) LLENE EL VIAL DE MUESTRA POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE LLENADO ROJA INDICADO EN LA ETIQUETA.

No llenes demasiado. La tapa debe cerrarse sin derramar.

Si no se agrega suficiente muestra, es posible que el laboratorio no pueda procesar la muestra.

4




A) Mezcle con cuidado las heces y el líquido con la cuchara adherida a la tapa.

B) Vuelva a colocar la tapa herméticamente y agite el vial vigorosamente durante 30 segundos.

NOTA: Si se produce un derrame, enjuague el exterior del vial (solo con agua) después de sellarlo.

5

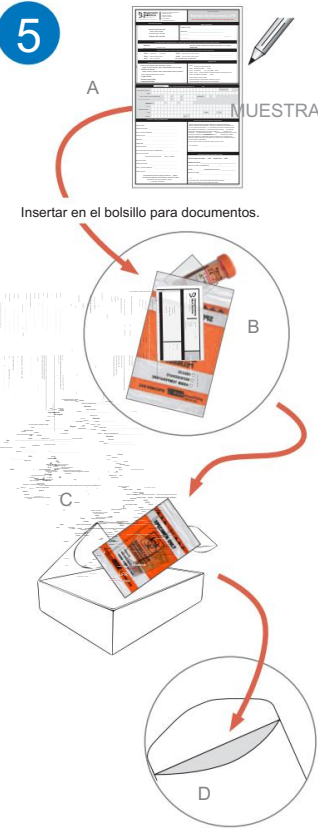

A) Complete completamente el formulario de solicitud de prueba y colóquelo en el bolsillo para documentos de la bolsa de muestras.

NOTA: Asegúrese de escribir la fecha de recolección de la muestra en el formulario.

La información incompleta en la sección del paciente resultará en un retraso en las pruebas.

Se debe completar el tipo de pago e incluir el pago para procesar la muestra.

B) Coloque el vial de muestra recolectado en la bolsa para muestras y ciérrela.

C) Coloque la bolsa de muestras con la muestra recolectada y el formulario de solicitud de prueba en la caja del kit.

D) Envíe la caja del kit completada de regreso al Laboratorio de Soluciones de Diagnóstico utilizando el paquete clínico preetiquetado.

Consulte los requisitos e instrucciones de envío importantes en la página siguiente.

## Artículos incluidos en su kit de colección

COLECCIÓN DE TABURETES

- 1 – Caja del kit
- 1 – Formulario de solicitud de prueba (TRF)
- 1 – Bandeja recolectora
- 1 – Vial de muestra\*
- 2 – Guantes
- 1 – Bolsa para muestras con cierre de cremallera
- 1 – Almohadilla absorbente
- 1 – Envío por correo del paquete clínico de FedEx
- 1 – Carta de porte
- 3 – Facturas Comerciales
- 1 – Bolsa transparente

Si le falta alguno de los componentes necesarios o tiene preguntas sobre la colección, llame al Departamento de Atención al Cliente de Diagnostic Solutions Laboratory al 877-485-5336.

\* Evite el contacto de la piel y los ojos con el líquido del vial de muestra. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si su piel entra en contacto con el líquido del vial, lávela con agua y jabón. Si se ingiere, comuníquese con un médico.

Los ensayos en GI-MAP fueron desarrollados y/o las características de rendimiento determinadas por Diagnostic Solutions Laboratory.



## GI Microbial Assay Plus

**IMPORTANTE:** La muestra de heces debe recibirse dentro de los 6 días posteriores a su recolección.

Si no puede enviar la muestra el día de la recolección, refrigérela y envíela lo antes posible, preferiblemente dentro de los 3 días.

## RESULTADOS EN LOS QUE PUEDES CONFIAR

ANÁLISIS DE HECES DE ADN mediante qPCR

## INSTRUCCIONES DE ENVÍO – CANADÁ y territorios de EE. UU.

1. Complete las secciones de nombre, dirección, número de teléfono y firma en las 3 facturas comerciales y carta de porte.
2. Coloque las facturas y la guía de embarque completadas en la bolsa transparente y péguela en el frente del Clinical Pak.
3. Llame a FedEx al 1-800-463-3339 para programar su recogida. Cuando comience el saludo automático, diga: "Programar una recogida".
4. Cuando se le pregunte si va a enviar un paquete, responda "Sí".
5. Hágales saber que realiza el envío utilizando una guía internacional.

[www.DiagnosticSolutionsLab.com](http://www.DiagnosticSolutionsLab.com) | INVESTIGACIÓN. TECNOLOGÍA. RESULTADOS.



GI-MAP™ | INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE TABURETES | R3TM-09262023 | CANADÁ | TERRITORIOS DE EE.UU.

## INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE TABURETES

– SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE –  
LA RECOPIACIÓN INADECUADA PUEDE INVALIDAR LOS RESULTADOS

## Artículos incluidos en su kit de colección

COLECCIÓN DE TABURETES

- 1 – Caja del kit
- 1 – Formulario de solicitud de prueba (TRF)
- 1 – Bandeja recolectora
- 1 – Vial de muestra\*
- 2 – Guantes
- 1 – Bolsa para muestras con cierre de cremallera
- 1 – Almohadilla absorbente
- 1 – Envío por correo del paquete clínico de FedEx
- 3 – Facturas Comerciales
- 1 – Bolsa transparente

Si le falta alguno de los componentes necesarios o tiene preguntas sobre la colección, llame al Departamento de Atención al Cliente de Diagnostic Solutions Laboratory al 877-485-5336.

\* Evite el contacto de la piel y los ojos con el líquido del vial de muestra. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si su piel entra en contacto con el líquido del vial, lávela con agua y jabón. Si se ingiere, comuníquese con un médico.

Los ensayos en GI-MAP fueron desarrollados y/o las características de rendimiento determinadas por Diagnostic Solutions Laboratory.



## GI Microbial Assay Plus

IMPORTANTE: La muestra de heces debe recibirse dentro de los 6 días posteriores a su recolección.

Si no puede enviar la muestra el día de la recolección, refrigérela y envíela lo antes posible, preferiblemente dentro de los 3 días.

## RESULTADOS EN LOS QUE PUEDES CONFIAR

ANÁLISIS DE HECES DE ADN mediante qPCR

## INSTRUCCIONES DE ENVÍO – INTERNACIONAL

1. Complete el nombre, dirección, número de teléfono, y apartados de firma en las 3 facturas comerciales.
2. Coloque las facturas completadas en la bolsa transparente y péguela en el frente del Clinical Pak.
3. Lleve el paquete clínico a una ubicación de FedEx (o al transportista de su elección) para enviar el paquete.

[www.DiagnosticSolutionsLab.com](http://www.DiagnosticSolutionsLab.com) | INVESTIGACIÓN. TECNOLOGÍA. RESULTADOS.



## INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE TABURETES

– SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE –  
LA RECOPIACIÓN INADECUADA PUEDE INVALIDAR LOS RESULTADOS