

Instrucciones para Test de Metilación de ADN, Doctors Data

Verificar el contenido del kit:

1. Dos fundas con dos hisopos aplicadores con punta de algodón estériles en cada funda (un total de cuatro hisopos)
1. Un Formulario de solicitud
2. Un Formulario de consentimiento informado
3. Un sobre de devolución con franqueo prepago

Lea todas las instrucciones y familiarícese con el procedimiento de recolección. Si tiene alguna pregunta, llame al 800.323.2784

Debe leer y completar el formulario de solicitud de prueba y firmarlo. En la sección de información de recolección del formulario de solicitud (ubicada en la esquina superior derecha) complete la fecha de recolección de la muestra. Además debe leer y rellenar el Consentimiento.

La prueba no se puede realizar sin un formulario de solicitud y consentimiento completo

Coloque el Formulario de Solicitud completo y el Formulario de Consentimiento Informado en el sobre junto con las dos fundas que contienen los hisopos recolectados.

Selle el sobre y solicite la recogida (ver Instrucciones para solicitar la recogida del paquete) lo antes posible después de la recolección.

Instrucciones para la toma de la muestra

1. Enjuáguese la boca con agua fría antes de tomar la muestra.
2. Cada funda de papel contiene dos hisopos. Se recogerán un total de cuatro hisopos.
3. Abra una manga y retire un hisopo a la vez. Guarde la funda de papel para devolver el hisopo después de recolectarlo.
4. Trague para eliminar el exceso de saliva. Con un movimiento circular, frote el primer hisopo en el interior de una mejilla unas 20 veces, con suficiente presión para que la mejilla se empuje hacia afuera.
5. Agite suavemente el hisopo en el aire para secarlo durante tres minutos.
6. Luego coloque el primer hisopo nuevamente en la manga. Retire el segundo hisopo de la manga y repita los pasos usando el mismo lado de la mejilla.
7. Usando el segundo juego de hisopos en la segunda manga, repita el mismo proceso usando el otro lado de la mejilla.
8. Coloque las dos fundas que contienen los cuatro hisopos secos en el sobre de papel provisto para el envío de devolución, **junto con el Formulario de Solicitud y el Formulario de Consentimiento completos. No coloque los hisopos en una bolsa de plástico.**

Instrucciones de envío de la muestra

Antes de tomar la muestra, comuníquese con nosotros a info@eneviahealth.com o al +598 97 199 539 para solicitar la etiqueta y programar la recogida, cuando nos escribas por favor Indícanos la dirección exacta y el horario en que la empresa de envíos puede recoger el paquete. Por ejemplo: "Nadal Centro, 28012 Madrid, España, de 08:00 a 14:00 horas".

Si te encuentras en **Argentina** o **Uruguay** por favor contacta con nuestros colaboradores en el país correspondiente para coordinar el envío.

Argentina: Franco Pongelli, +54 9 3413 20-1729
Uruguay: Antonella Fanetti, +598 9 9728557