

Instrucciones para Mineralograma de Pelo de Doctor's Data - Latinoamérica

Verificar el contenido del kit:

- 1 Báscula de pelo con instrucciones de recogida.
- 1 bolsa para muestras con cierre hermético.
- 1 sobre de devolución.
- 1 formulario de solicitud.

Lea todas las instrucciones y familiarícese con los procedimientos de recolección.

La prueba **no requiere una dieta especial y no es necesario suspender la toma de medicamentos, dietas o suplementos a menos que su médico le indique lo contrario.** Nunca suspendas los medicamentos recetados sin consultar primero a su médico.

Recoja la muestra de cabello según las instrucciones de la escala.

El **cabello con permanente, teñido, decolorado o tratado químicamente de otro modo** es vulnerable a la contaminación y **no se recomienda para análisis.**

No mezcle el vello de la cabeza con el vello púbico.

Instrucciones para identificar la muestra


1. Escriba el nombre del paciente, la fecha de recolección y la fecha de nacimiento del paciente en la **bolsa de la muestra** y luego llénela con la muestra.
2. **Complete el formulario de solicitud de examen en la sección 3 "Test Ordered" y la**

sección 4 "Patient Information". La prueba no se puede realizar sin los datos del paciente.


3. Coloque el formulario de solicitud completo y la bolsa en el sobre de devolución y realice el envío de la muestra

Instrucciones para la toma de la muestra

1. Configure la báscula como se muestra en el diagrama. Doble las pestañas negras hacia abajo para formar un punto de apoyo y colóquelo sobre una superficie nivelada.

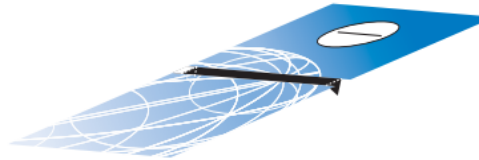


2. Debe cortar muestras de cabello de la parte posterior de la cabeza. (ver ilustración). Usando tijeras de acero inoxidable, corte el cabello lo más cerca del cuero cabelludo como sea posible. Es mejor si son pequeñas cantidades de cabello que se cortan de 5 o 6 áreas en el área de la nuca.

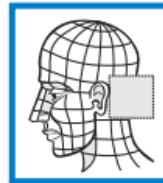

3. A medida que corte cada mechón de cabello de la cabeza, guarde sólo 1 pulgada (2,5 cm) del cabello más cercano al cuero cabelludo. Corte y

deseche el resto. Coloque el cabello guardado en la báscula.

4. Continúe cortando y agregando cabello a la báscula. La báscula está diseñada para recoger alrededor de 0,25 gramos de pelo.

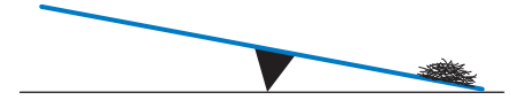

5. Etiquete la bolsa de plástico con el nombre del paciente, fecha de nacimiento, sexo, fecha de recolección, nombre del médico y tipo de pelo.
6. Coloque el pelo en la bolsa de plástico, ciérrela y solicite la recogida de su paquete.

Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse al correo electrónico info@eneviahealth.com

Instrucciones de envío de la muestra

Antes de tomar la muestra, comuníquese con nosotros a info@eneviahealth.com o al +598 97 199 539 para solicitar la etiqueta y programar la recogida, cuando nos escribas por favor Indícanos la dirección exacta y el horario en que la empresa de envíos puede recoger el paquete. Por ejemplo: "Nadal Centro, 28012 Madrid, España, de 08:00 a 14:00 horas".

Si te encuentras en Argentina o Uruguay por favor contacta con nuestros colaboradores en el país correspondiente para coordinar el envío.

Argentina: Franco Pongelli, +54 9 3413 20-1729
Uruguay: Antonella Fanetti, +598 9 9728557